



Следвайте тези инструкции всеки път, когато ползвате този респиратор за частици.

1. Поставете маската в дланта на едната си ръка, а с другата хванете придържащите презрамки.
2. Поставете маската върху устата и носа си и издърпайте придържащите презрамки така, че да обхванат главата ви.
3. Поставете едната от презрамките върху темето си, а другата – на тила, като внимавате да не се усучат.
4. С двете ръце едновременно поставете внимателно маската върху лицето си, като огънете гъвкавата ѝ телена скоба така, че да следва естествения релеф на носа.
5. Общото обтягане може да се увеличи чрез изтегляне на лентата от дясната катарамата. Обтягането между горната и долната ленти, може да се регулира чрез изтегляне на лентата през лявата катарамата.
6. Проверете дали маската е прилепнала добре към лицето ви, като поставите двете си ръце върху нея и вдишате и издишате рязко. Ако има изтичане на въздух около носа, прилепете по-добре скобата около носа си. Ако има изтичане на въздух по крайщата, пристегнете презрамките и/или променете положението на маската. В случай, че не можете да получите добро уплътнение, не влизайте в замърсената зона и уведомете началника си. Обърнете внимание, че ще усетите приток на въздух, идващ от страничните филтри. Не го бъркайте с липса на добро уплътнение около лицето.