



Při nasazování tohoto respirátoru vždy dodržujte tyto pokyny:

1. Uchopte těleso přístroje do jedné ruky a obě dvě pásy pro nasazení na hlavu do druhé ruky.
2. Nasadte přístroj na ústa a nos a stáhněte pásy pro nasazení na hlavu přes hlavu.
3. Přetáhněte jednu pásku na hlavu přes temeno a druhou za krkem a dbejte, aby pásy byly naplocho.
4. Pomocí obou rukou opatrně upravte nosový drát na tvar vašeho nosu.
5. Celkové napětí je možné zvýšit zatáhnutím za jazýček na pravostranné přezce. Napětí mezi horní a dolní páskou na hlavu upravte protáhnutím pásky levostrannou přezkou.
6. Odzkoušejte těsnost přístroje na tváři. Přiložte obě ruce na respirátor. Rychle se nadechněte a vydechněte. Pokud vzduch proniká okolo nosu, upravte znovu nosový drát. Pokud vzduch proniká okolo okrajů, utáhněte pásy na hlavu a/nebo změňte polohu respirátoru. Pokud nemůžete dosáhnout úplné těsnosti, nevstupujte do kontaminované oblasti a promluvte si se svým nadřízeným. Nezapomeňte, že budete cítit vzduch proudící postranními ventily. To neznamena netěsnost přístroje.