



Denne anvisning skal følges, hver gang partikelmasken tages på.

1. Tag fat om masken med den ene hånd, og tag begge hovedstropper i den anden.
2. Sæt masken over mund og næse, og træk hovedstropperne over hovedet.
3. Træk den ene af hovedstropperne op over issen og den anden ned på nakken; pas på, at stropperne ikke snor sig.
4. Brug begge hænder til forsigtigt at forme næsewiren efter næsens form.
5. Maskestramheden generelt kan øges ved at trække i fligen på spændet i højre side. Justér forskellen i stramhed mellem den øverste og nederste hovedstrop ved at skyde stroppen gennem spændet i venstre side.
6. Prøv, om masken sidder tæt på ansigtet. Sæt begge hænder over masken. Tag en kraftig indånding og udånding. Hvis der trænger luft ud omkring næsen, skal næsewiren justeres igen. Hvis der trænger luft ud omkring maskekanten, skal hovedstropperne strammes, og/eller masken skal flyttes. Hvis masken ikke kan gøres tæt, må man ikke gå ind i det kontaminerede område; man skal i så tilfælde rådføre sig med sin overordnede. Læg mærke til, at man kan mærke luftstrøm på tværs af ventilerne; dette må ikke forveksles med utætheder.