



Noudata näitä käyttöohjeita aina kun käytät hengityksensuojainta.

1. Tartu kämmenellä maskiosaan ja tartu toisella kädellä päähihnoihin.
2. Aseta maskiosa suun ja nenän päälle ja vedä päähihnat pään yli.
3. Vedä toinen päähihnoista pääläen yli ja toinen niskan takaa. Pidä huolta siitä, että hihnat eivät kierry.
4. Muotoile nenän päälle tuleva pidike huolellisesti nenäselän mukaisesti.
5. Hengityksensuojainta voidaan kiristää kauttaaltaan vetämällä oikealla puolella sijaitsevan soljen kielekkeestä. Säädä ylä- ja alahihnan välistä kiristystä vetämällä hihnaa vasemmalla puolella sijaitsevan soljen läpi.
6. Tarkista maskin tiiviys kasvoja vasten. Aseta molemmat kädet hengityksensuojaimen päälle. Hengitä nopeasti sisään ja ulos. Jos nenän ympärillä esiintyy ilmavuotoa, säädä nenäselän päällä olevaa pidikettä. Jos ilmavuotoja esiintyy reunojen kautta, kiristä päähihnoja ja/tai säädä hengityksensuojaimen asentoa. Jos et saa hengityksensuojainta tiiviiksi, älä mene saastuneelle alueelle, vaan ota yhteys esimieheesi. Huomaa, että voit tuntea ilman virtaavan sivuventtiileiden kautta. Tämä ei ole ilmavuodon merkki.