



Mindig kövesse az alábbi utasításokat, amikor a félálarcot viseli.

1. Helyezze a félálarcot az egyik tenyerébe, és a másik kezével fogja meg mindkét fejpántot.
2. Tegye a félálarcot a szája és az orra elé, és húzza át a fején a pántokat.
3. Az egyik fejpántot a fejtető, a másikat a nyak mögé helyezze, és ügyeljen rá, hogy ne csavarodjanak meg.
4. Két kézzel óvatosan nyomja rá az orrára az orrnál lévő fémet, hogy felvegye az orra alakját.
5. A jobb oldali csattal az egész pánt feszessége állítható. A felső és az alsó fejpánt feszességének különbségét úgy állíthatja be, hogy a pántot áthúzza a bal oldali csaton.
6. Próbálja ki a félálarc tömítését az arcon. Tegye mindkét kezét a félálarcra. Lélegezzen be és ki gyorsan. Ha levegő szivárog az orra körül, állítsa be újra a fémet. Ha levegő szivárog a fémnél, húzza meg a fejpántokat és/vagy helyezze át a félálarcot. Ha nem tud megfelelő tömítést elérni, ne lépjen be a fertőzött területre, és forduljon a feletteséhez. Az oldalsó szelepeken keresztüli légáramlást ne tévessze össze a levegő szivárgásával!