



마스크를 착용할 때 아래 지침을 따르십시오.

1. 한 손으로 마스크를 받치고 다른 손으로 양쪽 머리끈을 잡으십시오.
2. 마스크를 입과 귀에 걸치고 머리끈을 머리 위로 당기십시오.
3. 머리끈을 편평하게 유지하면서 머리끈 한 쪽을 정수리 위로 당기고 다른 쪽을 목 뒤로 당기십시오.
4. 양쪽 손으로 조심스럽게 코의 모양에 맞게 코심을 본뜨십시오.
5. 전체 장력은 오른쪽 버클의 탭을 당겨 늘릴 수 있습니다. 왼쪽 버클을 통해 끈을 움직여 위와 아래 머리띠 사이의 장력을 조절하십시오.
6. 마스크가 얼굴에 빈틈 없이 덮였는지 시험하십시오. 양쪽 손을 마스크 위에 대십시오. 짧게 들이쉬고 내쉽니다. 코 주위에 공기가 새 경우 코심을 다시 조절하십시오. 가장자리 주위에 공기가 새 경우 머리끈을 조이거나 마스크 위치를 조정하십시오. 적절한 기밀을 유지할 수 없을 경우 오염된 공간에 들어가지 말고 감독자에게 보고하십시오. 측면 밸브를 지나는 공기 흐름을 공기 누출과 혼동하지 마십시오.