



Katrā lietošanas reizē rūpīgi sekojiet šiem norādījumiem.

1. Satveriet masku vienā saujā, bet ar otru roku satveriet abas galvas saites.
2. Novietojiet masku pār muti un degunu un velciet saites pāri galvai.
3. Novietojiet vienu no galvas saitēm virs ausīm, bet otru aiz kakla un noplaciniet tās.
4. Ar abu roku palīdzību pielāgojiet deguna stiepli deguna formai.
5. Kopējo spriedzi var palielināt pavelkot cilpiņu sprādzes labajā pusē. Noregulējiet spriedzi starp augšējo un apakšējo galvas saiti, virzot saiti cauri kreisajai sprādzei.
6. Pārbaudiet maskas piekļaušanos sejai. Uzlieciet abas rokas uz respiratora. Krasi ieelpojiet un izelpojiet. Ja gaiss plūst garām degunam, vēlreiz pielāgojiet deguna stiepli. Ja gaiss noplūst gar malām, pievelciet ciešāk galvas saites un/vai mainiet respiratora pozīciju. Ja nespējat nodrošināt atbilstošu hermetizāciju, neejiet piesārņotajā zonā un uzmeklējiet darba vadītāju. Lūdzu, ievērojiet, ka gaisa plūsma caur sānu vārstiem ir normāla parādība un nav uzskatāma par gaisa nepareizu noplūdi.