

Przy każdym użyciu maski należy postępować według poniższych instrukcji.

1. Uchwycić maskę jedną ręką, a oba zakładane na głowę paski drugą ręką.
2. Umieścić maskę ponad ustami i nosem i przeciągnąć paski przez głowę.
3. Umieścić jeden pasek nad szyją, a drugi na szczycie głowy, uważając, aby były ułożone na płasko.
4. Przy pomocy obu rąk, ostrożnie ukształtować drut wokół nosa.
5. Całkowite napięcie można zwiększyć przez pociągnięcie wypustki w klamrze po prawej stronie. Wyregulować napięcie między górnym i dolnym paskiem przesuwając pasek przez klamrę po lewej stronie.
6. Wypróbować uszczelnienie maski względem twarzy. Umieścić obie ręce na masce. Wykonać gwałtowny wdech i wydech. Jeżeli przedostaje się powietrze wokół nosa, należy wyregulować ponownie drut wokół nosa. Jeżeli przedostaje się powietrze wokół brzegów, dociągnąć paski i/lub ułożyć ponownie maskę. Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie prawidłowego uszczelnienia, nie należy wchodzić do zanieczyszczonego obszaru i skontaktować się ze swoim przełożonym. Proszę zwrócić uwagę, że będzie wyczuwalny przepływ powietrza przez boczne zawory, czego nie należy mylić z brakiem szczelności.