



A se urma aceste instrucțiuni de fiecare dată când se folosește masca pentru respirație

1. A se ține masca într-o mână și a se prinde amândouă baretele cu cealaltă mână.
2. A se plasa masca peste gură și nas și a se trage baretele peste cap.
3. A se trage una din barete peste creștetul capului iar cealaltă la ceafă, având grijă a se menține baretele drepte.
4. Modelați masca pe nas cu amândouă mâinile.
5. Tensiunea poate fi mărită trăgând de catarama din dreapta. A se potrivi tensiunea între partea de sus și partea de jos, glisând bareta prin catarama stângă.
6. A se testa aderența măștii la față. A se pune amândouă mâinile pe mască și a se inspira și expira adânc. Dacă aerul va circula în jurul nasului, masca va trebui să fie mai strânsă. Dacă aerul se va strecura pe la marginile măștii, ajustați baretele și/sau repositionați masca. Dacă nu se poate obține o sigilare corespunzătoare, a nu se pătrunde în zona contaminată și a se lua legătura cu superiorul dumneavoastră. A nu se confunda aerul care trece prin valvele laterale, cu pierderile de aer.