



Pri nasadzovaní tohto respirátora vždy dodržte tieto pokyny:

1. Uchopte teleso prístroja do jednej ruky a obidve pásky na hlavu do druhej ruky.
2. Nasadte prístroj na ústa a nos a stiahnite pásky na hlavu cez hlavu.
3. Pretiahnite jednu pásku na hlavu cez temeno a druhú za krkom a dbajte, aby pásky boli naplocho.
4. Pomocou obidvoch rúk opatrne upravte nosový drôt na tvar vášho nosu.
5. Celkové napätie je možné zvýšiť zatiahnutím za jazýček na pravostrannej pracke. Napätie medzi hornou a dolnou páskou na hlavu upravte pretiahnutím pásky cez ľavostrannú pracku.
6. Odkúšajte tesnosť prístroja na tvári. Priložte obidve ruky na respirátor. Rýchlo sa nadýchnite a vydýchnite. Ak vzduch preniká okolo nosu, upravte znovu nosový drôt. Ak vzduch preniká okolo okrajov, utiahnite pásky na hlavu a/alebo zmeňte polohu respirátora. Ak nemôžete dosiahnuť úplnú tesnosť, nevstupujte do kontaminovanej oblasti a prehovorte si so svojím nadriadeným. Nezabudnite, že budete cítiť prúd vzduchu cez postranné ventily. To neznamená netesnosť prístroja.