



Respiratörü her taktığınızda aşağıdaki talimatlara uyunuz.

1. Respiratörü avucunuzun içine alın ve diğer elinizle her iki baş şeridini tutun.
2. Respiratörü ağız ve burnunuzun üzerine yerleştirin ve şeritleri başınıza geçirin.
3. Şeritlerin birini başınızın üst kısmına, diğerini ise ensenizin arkasına çekerek yerleştirin, şeritlerin düz olmasına dikkat edin.
4. Her iki elinizi kullanarak burun telini burnunuzun şeklini alacak şekilde eğin.
5. Genel gerginlik sağ taraftaki toka üzerindeki şerit çekilerek artırılabilir. Şeridi soldaki toka üzerinde kaydırarak üst ve alt baş şeritlerinin gerginliği ayarlayın.
6. Respiratörün yüze oturup oturmadığını test edin. Her iki elinizi respiratörün üzerine yerleştirin. Güçlü bir şekilde nefes alın ve verin. Burun etrafında herhangi bir sızıntı varsa burun telini tekrar ayarlayın. Kenarlarda sızıntı olması durumunda baş şeritlerini gerginleştirin ve/veya respiratörün konumunu değiştirin. Respiratörün tam olarak oturmadığını düşünüyorsanız kirlenmiş alana girmeyin ve amirimize başvurun. Lütfen yandaki valflardan hava akışını hissedeceğinizi unutmayınız, bu durumu hava sızıntısı ile karıştırmayınız.